



# Falck Spokesman

## 3504-3508-3516

Comunicatori simbolici

Nella foto: Falck Spokesman 3516 Symphony



### **Cos'è la linea di Falck Spokesman**

Falck Spokesman è una linea di comunicatori simbolici, da 1 a 16 tasti, costituiti da un sistema per la registrazione della voce e il suo ascolto per persone con limitazioni nella voce o nel linguaggio. Questo strumento può amplificare le possibilità di comunicazione per molte persone con difficoltà ad esprimersi, tramite messaggi "parlati" rappresentati mediante simboli in ogni tasto del comunicatore.

Premendo i tasti sui quali è già stato registrato un messaggio, il messaggio viene riprodotto ed ascoltato. I tasti possono venire contraddistinti con simboli, parole, combinazioni di simboli e parole, lettere, immagini, per una facile identificazione dei messaggi relativi.

Il Falck Spokesman funziona tramite una batteria a 9V usa e getta.

### **Flessibilità**

Il Falck Spokesman è stato studiato per essere facile da usare e da preparare per l'uso. Intercambiando gli Overlay, ed eventualmente unito ad una serie di fogli contenenti simboli per la comunicazione, l'utente ha a sua disposizione una eccellente flessibilità, unita ad una grande portabilità dello strumento, derivata dalle piccole dimensioni, unite ad un peso estremamente contenuto. Il Falck Spokesman ha un microfono integrato ed un altoparlante integrato.

I tasti sono sensibili al tocco anche con modesta pressione.

Tutti i modelli sono dotati di un attacco per amplificatore esterno.

Alcuni modelli sono anche dotati di attacchi per attivatori/pulsanti esterni.

### **"FingerGuide"**

Il Falck Spokesman può essere dotato di FingerGuide (opzionali) in materiale trasparente, in grado di facilitare la pressione di uno specifico tasto anche da parte di chi ha ridotte capacità motorie, come per esempio tremori, guidando il dito su un singolo tasto, impedendo quindi accidentali pressioni di due o più tasti.

### **"Overlay"**

Piccoli fogli di carta, contenenti le immagini relative ad ogni tasto, si chiamano "Overlay".

Questi fogli possono essere inseriti facilmente sotto la membrana superiore dei tasti, rimanendo quindi protetto dall'usura dovuta alla pressione delle dita sulla superficie dei tasti.

La facilità della rimozione e dell'inserimento permettono di predisporre nuovi set di immagini per i tasti molto velocemente, per adeguarsi alle mutate necessità di comunicazione.

### **Registrazione**

Può essere facilmente registrato un messaggio per ogni tasto del comunicatore.

È sufficiente posizionare il cursore posto nel lato alto del Falck Spokesman su "record", tenere premuto il tasto desiderato mentre si parla chiaramente verso il microfono incorporato.

### **Utilizzo**

L'utilizzo del Falck Spokesman è estremamente semplice: effettuata la registrazione delle parole o delle frasi in ogni tasto, basta schiacciare il tasto per sentire la riproduzione di quanto registrato. La comunicazione sulla punta delle dita!



## Microfono

Il Falck Spokesman è dotato di un sensibile microfono per la registrazione dei messaggi vocali.

## Altoparlante

Il Falck Spokesman è dotato di un altoparlante esterno, ma anche di una uscita per altoparlante esterno o per un registratore.

## Attacchi per attivatori esterni

I modelli 3501, 3502, 3504, 3508 sono dotati di connettori jack da 3,5 mm per la connessione di dispositivi attivatori esterni (tasti speciali, interruttori, etc.)

## Accensione e spegnimento

Il Falck Spokesman è dotato di un cursore per l'accensione e lo spegnimento. Ciononostante, se l'utente dimentica di spegnere il comunicatore questo si posiziona in modalità "Sleep", riducendo drasticamente il consumo della batteria, risvegliandosi solamente alla pressione di un tasto.

## Capacità di registrazione e numero dei tasti

La serie Falck Spokesman è composta da diversi modelli.

Falck 3504 Quartet 4 tasti da 4 secondi  
Falck 3508 Octet 8 tasti da 4 secondi  
Falck 3516 Symphony 16 tasti da 4 secondi

## Batteria

Il Falck Spokesman utilizza una batteria usa e getta alcalina da 9 V.

## Specifiche tecniche

Dimensioni:	16 x 10 x 3 cm
Batterie:	una batteria da 9V
Consumo:	
In modalità "Sleep":	da 0,2 a 0,5 mA
In modalità "Riproduzione":	3501: 60 mA 3502: 60 mA 3504: 60 mA 3508: 60 mA 3516: 75 mA
In modalità "Registrazione":	da 7 mA a 30 mA
In modalità "Off":	3501: 70 µA 3502: 70 µA 3504: 70 µA 3508: 130 µA 3516: 420 µA

## Opzioni

Libro porta comunicatore  
FingerGuide autoadesivo per i modelli a 2, 4, 8 e 16 tasti  
Connettore a Y per i modelli 3504 e 3508

Il produttore si riserva di modificare le caratteristiche del prodotto senza preavviso.

La copia, traduzione riproduzione in qualunque modalità effettuata di questa brochure è proibita senza il consenso scritto di Khymeia S.r.l.

## Khymeia S.r.l.

Knowledge in Hypertechnology & Medical Innovative Applications

### Main Office and Labs:

Piazza Europa, 9  
35027 Noventa Padovana - Padova Italy

### Showroom:

Piazza Europa, 10  
35027 Noventa Padovana - Padova Italy

Tel: ++39 0498935107

Fax: ++39 0498957242

e-mail: info@khymeia.com

web: http://www.khymeia.com